

## PACOTE DESAFIO CLEAN TEST – INTEGRATOR

REF.: 797 - 815

O pacote desafio Clean Test integrador é um teste de uso único projetado para fornecer um desafio em autoclaves a 121°C e 134°C. É equivalente em desempenho a um indicador biológico aprovado no AAMI. Resultados na região de segurança refletem as condições do esterilizador que excedam os exigidos para matar esporos em indicadores biológicos. Resultados na região insatisfatória significam que as condições exigidas para a esterilidade não foram alcançadas. Proporciona uma leitura clara e simples para a liberação de carga imediata.

### Conformidade

- ✓ Integrador tipo pastilha tipo 5 - Em conformidade com AAMI / ISO 11140-1: 2014, Tipo 5.
- ✓ Pacote Teste Desafio de acordo com o desafio recomendado pela AAMI.

### Parâmetros Críticos de Processo

Pode ser utilizado em esterilizadores 121°C e 134°C. Verifique o tempo de morte do lote de indicadores biológicos utilizados no produto em nosso site.

### Código de referência / Composição do produto

Referência	Conteúdo do PCD - DUO	Quant.
797	✓ Integrador tipo 5 pastilha	1 und.
815	✓ Integrador tipo 5 pastilha	Cx. 24 und.

### Instruções de Uso:

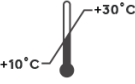



- 1- Posicione o pacote perto da porta da autoclave, prateleira inferior de uma autoclave carregada normalmente, com a parte frontal do pacote voltado para cima como a escrita “ESTE LADO PARA CIMA”, onde se encontra o indicador químico de passagem, que após a esterilização mudará a cor de rosa para marrom.
- 2- Executar um ciclo de esterilização de acordo com as instruções do fabricante.
- 3- Remover o pacote da autoclave. **Cuidado:** O pacote e conteúdos podem estar quentes. O operador deve usar luvas apropriadas e óculos de segurança. Abra o bloco e remova o indicador de esterilização Integrador e um cartão de registro.
- 4- Examine o indicador de esterilização Integrador. Se a barra de cor escura não atingir a área de segurança o teste deve ser repetido com uma nova embalagem. O esterilizador e/ou o ciclo utilizado deve ser examinado.
- 5- Preencha as informações necessárias na ficha de registro. Salvar como um registro permanente.
- 6- Descarte o restante do pacote teste, ele não pode ser reutilizado.

### Livre de chumbo.

**Fabricante:** Clean-Up Brazil Biotecnologia Ltda  
CNPJ 05.161.206/0001-17.

**Responsável Técnico:** Daniel Davi Gruchinski.  
CRQ IX 09203188

**Armazenamento:**

	<p>Temperatura: 10 °C a 30 °C.</p>		<p>Umidade relativa: 30 % a 80 %.</p>
	<p>Mantenha em local seco, sem condensação.</p>		<p>Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.</p>



**Isento de registro/cadastro conforme instrução normativa nº 2 de 31 de maio de 2011.**