

# PACOTE DESAFIO CLEAN TEST - INTEGRATOR

Ref: 1857 e 1858

Um desafio  
para autoclave



Fácil utilização



## Sobre o produto

- ⇒ Indicador químico conforme **ISO 11140-1**.
- ⇒ **Incluso** um integrador pastilha Tipo 5.
- ⇒ **Testes** de qualificação do esterilizador e monitorização da eficácia do esterilizador de rotina.

### INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM	BAR CODE
1857	1 PACOTE	 7 898939 079692
1858	CAIXA C/24 UND	 7 898939 079692

## Descrição do Produto

O pacote desafio Clean Test integrador é um teste de uso único projetado para fornecer um desafio em autoclaves a 121°C e 134°C. É equivalente em desempenho a um indicador biológico aprovado no AAMI. Resultados na região de segurança refletem as condições do esterilizador que excedam os exigidos para matar esporos em indicadores biológicos. Resultados na região insatisfatória significam que as condições exigidas para a esterilidade não foram alcançadas. Proporciona uma leitura clara e simples para a liberação de carga imediata.

## Instruções de Uso

- 1- Posicione o pacote perto da porta da autoclave, prateleira inferior de uma autoclave carregada normalmente, com a parte frontal do pacote voltado para cima como a escrita "ESTE LADO PARA CIMA", onde se encontra o indicador químico de passagem, que após a esterilização mudará a cor de rosa para marrom.
- 2- Executar um ciclo de esterilização de acordo com as instruções do fabricante.
- 3- Remover o pacote da autoclave. Cuidado: O pacote e conteúdos podem estar quentes. O operador deve usar luvas apropriadas e óculos de segurança. Abra o bloco e remova o indicador de esterilização Integrador e um cartão de registro.
- 4- Examine o indicador de esterilização Integrador. Se a barra de cor escura não atingir a área de segurança o teste deve ser repetido com uma nova embalagem. O esterilizador e/ou o ciclo utilizado deve ser examinado.
- 5- Preencha as informações necessárias na ficha de registo. Salvar como um registro permanente.
- 6- Descarte o restante do pacote teste, ele não pode ser reutilizado.

## Parâmetros Críticos do Processo

Pode ser utilizado em esterilizadores 121°C e 134°C. Verifique o tempo de morte do lote de indicadores biológicos utilizados no produto em nosso site.

Referência	Conteúdo do PCD - Integrator	Quantidade
1857	Integrador Tipo 5 pastilha	1 Und.
1858	Integrador Tipo 5 pastilha	Cx. 24 Und.

## Conformidade

Integrador tipo pastilha tipo 5 - Em conformidade com AAMI / ISO 11140-1:2014, Tipo 5.

Pacote Teste Desafio de acordo com o desafio recomendado pela AAMI.

## Características Físicas

**Dimensões:** 13,5cm x 14cm;

**Identificação:** Lote e data de validade estão impressos no pacote desafio.

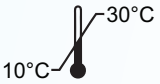
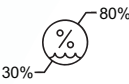


**Validade:** 2 anos após a data de fabricação.

**Fabricante:** Clean-Up Brazil Biotecnologia Ltda

**Não apresenta risco à saúde.**

**Livre de chumbo.**

## Armazenamento

 <p>Temperatura: 10 °C a 30 °C.</p>	 <p>Umidade relativa: 30% a 80%.</p>
 <p>Mantenha em local seco, sem condensação.</p>	 <p>Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.</p>