

# INCUBADORA MINI-CLEAN - PLUS

Ref: 1706

9 Cavidades

Incubação  
a 37 °C e 58 °C



## Sobre o produto

- ⇒ Incubação de **indicadores biológicos e esporos suspensos.**
- ⇒ Incubadora **bivolt**: 127-220 V<sub>AC</sub>.
- ⇒ **Fácil** manuseio.
- ⇒ Ótimo **custo benefício.**

### INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM	BAR CODE
1706	CAIXA COM 1 UNIDADE	

7 898939 079821



## Descrição do Produto


A finalidade desse equipamento é a incubação de indicadores biológicos autocontidos e de esporos suspensos, colorimétricos, utilizados na monitoração dos processos de esterilização de Vapor, Vapor de Baixa Temperatura e Formaldeído (VBTF), Peróxido de hidrogênio e Óxido de Etileno. Verifique a temperatura ideal de incubação para cada tipo de indicador biológico, a incubadora pode ser ajustada para temperaturas de  $58^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  e  $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ .

## Instrução de Uso

1. Ligue o aparelho na tomada observando a tensão indicada. Um dos LEDs de luz verde acenderá indicando que a incubadora está ligada. O outro LED piscará até a estabilização da temperatura, que levará aproximadamente 20 minutos.
2. Verifique e ajuste a temperatura da incubadora em relação a temperatura de incubação indicada para o indicador biológico utilizado.
3. Siga as orientações do fabricante para o processo de esterilização, após remova os indicadores biológicos da autoclave, aguarde 15 minutos, ative-os conforme manual do fabricante e coloque-os na incubadora previamente aquecida.
4. Aguarde o tempo de incubação necessário de acordo com as instruções do fabricante do seu indicador biológico (Ex: 24 horas);
5. Depois de decorrido o tempo necessário para incubação, remova o indicador biológico da área de incubação e avalie os resultados. O crescimento bacteriano é indicado pela mudança de cor do indicador biológico de acordo com as instruções do fabricante.

## Características Físicas

A incubadora possui 09 cavidades de incubação, 06 cavidades tradicionais com 9,5 mm de diâmetro, sendo 02 delas com adicional da extrusão para quebrar ampolas; 03 cavidades de 13,15 mm de diâmetro, que possibilitam a incubação de indicadores tradicionais e indicadores biológicos de esporos suspensos.

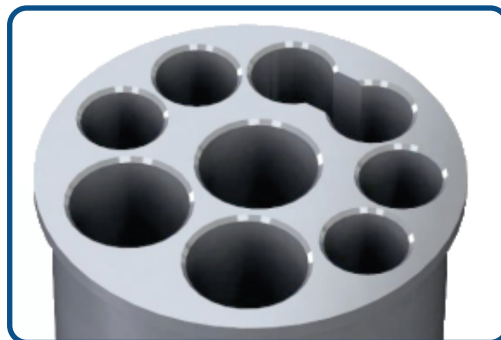

**Dimensões externas do equipamento (CxLxA):** 6,7 x 7,0 x 6,9 cm.

**Identificação:** Lote estão impressos na parte posterior do equipamento, bem como na lateral da caixa.

**Produto fabricado por:** Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda.

## Dados Técnicos



Dados Técnicos	Incubadora Clean-Up
<b>Certificações</b>	Empresa cujo sistema de Gestão da Qualidade está em conformidade com a ISO 9001:2015.
<b>Garantia</b>	2 anos
<b>Capacidade</b>	09 indicadores biológicos
<b>Peso</b>	310 gramas
<b>Dimensões externas (CxLxA)</b>	6,7 x 7,0 x 6,9 cm
<b>Tensão</b>	100-240V~50/60Hz
<b>Potência</b>	15 Watts
<b>Temperatura de trabalho</b>	* 58 °C +/- 2 °C e 37 °C +/- 2 °C
<b>Condições do ambiente adequada</b>	Temperatura: 15 °C - 35 °C Umidade Relativa: 20% - 80% (não condensável)