


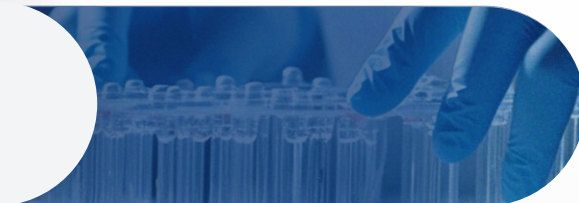

Descritivo Técnico

Clean Up Biotecnologia



→ Produto

Integrador Químico Clean Test - Tiras

Referência: C1258, C1260 e C1261 >

Tipo: 5 >

Excelente estabilidade >



→ Sobre o Produto

01

Integrador conforme ISO 11140: 2014 >

02

**Monitoramento de processos
de esterilização a vapor** >

03

Leitura fácil e imediata >

04

Ótimo custo benefício. >

→ Informações para Pedidos

ITEM #

C1258

C1260

C1261

EMBALAGEM

Pacote com 25 unidades

Pacote com 100 unidades

Pacote com 250 unidades

CÓDIGO DE BARRAS



7 898939 079340



7 898939 079050



7 898939 079203

→ Descrição do Produto

Integrador Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a Vapor de uso profissional, proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. Excelente estabilidade indicadora antes e depois da exposição. **Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de vapor** em relação a curva de morte do indicador biológico. Os parâmetros críticos de esterilização são:

Temperatura	Tempo	Condição
121 °C	≥ 16,5 min	Vapor Saturado
135 °C	≥ 1,2 min	Vapor Saturado

Esta condição é calibrada com o tempo de morte de esporos *Geobacillus stearothermophilus*, calculado em um BIER Vessel (Biological Indicator Evaluation Resistometer), conforme estipulado em ISO 11140 para um Indicador químico Tipo 5.

→ Instrução de uso

- 01. Destaque uma unidade** de integrador da cartela sem remove-lo do *liner* (papel base do autoadesivo). Coloque o Integrador na embalagem a esterilizar.
- 02. Execute** o ciclo de esterilização.
- 03. Avalie a mudança de cor**, a área que inicialmente é rosa, agora deve ser igual ou mais escura que a cor de referência presente no produto.
- 04. Caso não ocorra a mudança de cor** conforme o gabarito, investigue o processo de esterilização e os demais indicadores químicos, bem como o teste biológico. Todo o material deve ser reesterilizado com uma nova tira integradora.
- 05. Documente os resultados removendo** o *liner* do integrador e adesive no local de registro. O local de registro deve ser um ambiente protegido de luz e de alta umidade.

→ Características Físicas

Produto é Lead Free -
Livre de Chumbo

Medidas: 75mm x 19mm

Identificação: Lote e data de validade
estão impressos em cada tira


Produto fabricado por:
Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda.

Validade: 24 meses após a
data de fabricação

→ Relação de cores


Cor inicial - Não Processado

Produto apresentando um padrão de cor inicial rosa

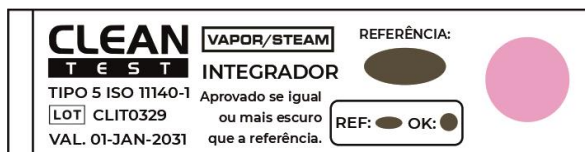

Cor final - Processado e Aprovado

Coloração igual ou mais escura que a cor de referência, parâmetros críticos do processo alcançados

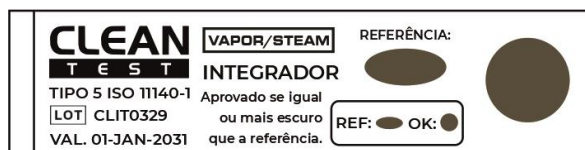

Obs: As cores mostradas são representações das cores iniciais e de sinal da tinta impressa, mas podem variar em relação ao uso real. Cor irreversível quando armazenado em conformidade com os critérios de armazenagem para o produto.

→ Armazenamento



Temperatura:
10 °C a 32 °C.



Umidade relativa:
20% a 80%



Mantenha em local seco,
sem condensação



Mantenha protegido de agentes
esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA n° 751/2022.



sac@cleanupbrazil.com.br



cleanupbrazil.com.br



+55 44 3017-1588