


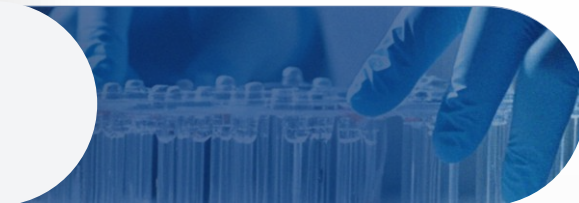

Descritivo Técnico

Clean Up Biotecnologia



→ Produto

Indicador Químico Circular Tipo 1 para Vapor

Referência: C1736



Transição de cor



Fácil e simples utilização



→ Sobre o Produto

01

Indicador químico **conforme
ISO 11140-1**



02

Monitora a exposição de processos
de esterilização de vapor



03

Transição de cor para melhor
visualização do processo



04

Ótimo **custo benefício**



→ Informações para Pedidos

ITEM #

C1736

EMBALAGEM

Rolo c/1000 Unidades

→ Descrição do Produto

Indicadores de processo para calor úmido (vapor) são fabricados para atender as especificações descritas na norma ANSI / AAMI / ISO 11140-1 para os indicadores de Tipo 1. Os indicadores químicos Tipo 1 Vapor não são destinados para utilização como indicadores de esterilidade, mas como indicadores do processo de transferência utilizado para monitorar a exposição de processos de esterilização de Vapor. Use um indicador em cada item, embalagem, pacote ou bandeja que será processado. Processar os pacotes/itens conforme instruído no esterilizador. Após a exposição ao vapor, o indicador passará de rosa para cocoa (marrom). A cor de transição pode variar dependendo da configuração da carga e as condições de exposição. Transição de cor consistente e irreversível quando armazenado protegido de luz e umidade (conforme descrito em armazenagem).

Não Processado



Processado



Obs: As cores mostradas são representações de tinta inicial e cores de sinal impressas, mas podem variar de uso real. A cor do sinal obtida a partir da exposição a vapor pode variar do exemplo acima devido a diferenças nos parâmetros de processamento (isto é, teor de carga, tempo de ciclo, temperatura, etc.). Para um Indicador de processo Tipo 1, qualquer alteração de cor produzida durante a exposição a diferente da cor inicial é considerada aceitável.

→ Conformidade

- ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products – Chemical indicators- Part 1: General requirements* para indicadores químicos Tipo 1.

→ Características Físicas

Conteúdo: Um rolo com 1000 unidades

Medidas: Cada indicador possui um diâmetro de 11,15 mm

Identificação: Lote e data de fabricação estão impressos na parte interior do rolo

Validade: 24 meses após a data de fabricação



Produto é Lead Free – Livre de Chumbo.

→ Armazenamento



Temperatura:
10 °C a 30 °C.



Umidade relativa:
30% a 80%



Mantenha em local seco,
sem condensação



Mantenha protegido de agentes
esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA n° 751/2022.



sac@cleanupbrazil.com.br



cleanupbrazil.com.br



+55 44 3017-1588