


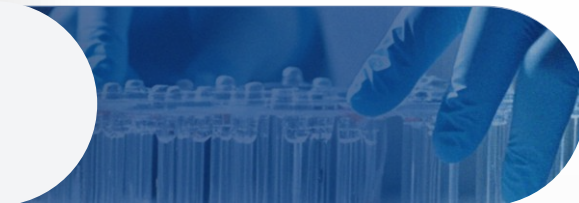

Descritivo Técnico

Clean Up Biotecnologia



→ Produto

Fita Adesiva para Hidrogênio Vaporizado (VH202)

Referência: C1266



Identificação de itens processados



Fácil adesão aos materiais



→ Sobre o Produto

01

Identifica itens processados e não processados



02

Mudança de cor para identificação



03

Tinta reativa de peróxido de hidrogênio



04

Ótimo **custo benefício**



→ Informações para Pedidos

ITEM #

EMBALAGEM

C1266

Pacote com 1 unidade

→ Descrição do Produto

Esta é uma fita disponível em largura de 19 mm e impressa com um indicador de processo -tinta reativa de peróxido de hidrogênio vaporizado (VH₂O₂) e plasma. As fitas destinam-se a demonstrar a exposição ao processo de esterilização peróxido de hidrogênio e distinguir pacotes processados e não processados. A mudança de cor não deve ser interpretada como indicações da adequação do ciclo de esterilização.

A cor do indicador não processado é azul escuro/roxo, o qual mudará para rosa após a exposição à esterilização. Após a exposição (mantida em armazenagem dentro da temperatura recomendada de 15°C-30°C e RH 35-60% em um lugar escuro), a cor rosa permanecerá pelo menos 3 anos.

→ Conformidade

- ● ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products – Chemical indicators- Part 1: General requirements* para indicadores químicos Tipo 1.

→ Características Físicas

Produto é Lead Free- Livre de Chumbo

Medidas: 19mm x 5m

Identificação: Lote e data de fabricação estão impressos na embalagem do produto

Validade: 24 meses após a data de fabricação

→ Armazenamento



Temperatura:
15 °C a 30 °C.



Umidade relativa:
35% a 60%



Mantenha em local seco,
sem condensação



Mantenha protegido de agentes
esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA n° 751/2022.



sac@cleanupbrazil.com.br



cleanupbrazil.com.br



+55 44 3017-1588