


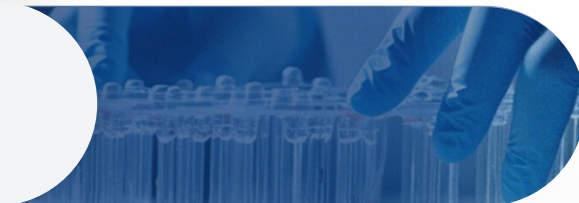

## Descritivo Técnico

Clean Up Biotecnologia



→ Produto

### Indicador Biológico Clean Test Leitura Rápida 3H

Referência: C1388

Resposta em até: 3 horas

Esporos *Geobacillus  
stearothermophilus*



→ Sobre o Produto

01  
Indicador biológico  
conforme ISO 11138

02  
Monitoramento de ciclos  
de esterilização a vapor

03  
Indicador químico externo  
que muda de cor

04  
Leitura por sistema de  
fluorescência.

→ Informações para Pedidos

ITEM #

EMBALAGEM

CÓDIGO DE BARRAS

C1388

Caixa com 50 unidades



7 898939 079227

## → Descrição do Produto

Indicador Biológico do tipo autocontido 3º geração para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura final em 3 horas. Para garantir a eficiência dos resultados do indicador biológico Clean-Test de leitura rápida, tomou-se como base a ISO 11138-8: 2021, que descreve a metodologia de validação da redução do tempo de incubação de indicadores biológicos.

Composto por uma tira de papel, impregnado com esporos de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 (não patógeno) contendo população mínima de  $1 \times 10^6$ , ampola de vidro lacrada e quebrável, contendo meio de cultura específico, leitura por sistema de fluorescência. As ampolas de vidro são acondicionadas em frasco termo plástico flexível, não cortante, permitindo que o meio de cultura entre em contato com o agente microbiano, sem risco de acidente profissional, com tampa permeável ao vapor e protegida de um papel de filtro bacteriano. Rótulo para identificação, fixado ao tubete, contendo data de fabricação, validade, e número de lote. Com indicador químico externo que muda de cor, após o ciclo de esterilização, diferenciando as ampolas processadas das não processadas. A ampola de indicador biológico suporta variações de 118°C a 137°C de temperatura.

## → Características Físicas

**Produto fabricado por:**  
Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda.

**Validade:** 24 meses após a data de fabricação

**Identificação:** Lote e data de validade estão impressos em cada indicador

**Dimensões:**  
**Cx 50 Und** → 63 x 64,9 x 122,8 mm

**Dimensões:**  
**Diâmetro da tampa** → 10,6 mm

**Dimensões:**  
**IB** → 59 mm de altura e 8,45 mm de diâmetro

## → Armazenamento



**Temperatura:**  
10 °C a 30 °C.



**Umidade relativa:**  
30% a 80%



**Mantenha em local seco,**  
sem condensação



**Mantenha protegido de** agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

## → Conformidade

- ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2017, *Sterilization of health care products - Biological Indicators - Part 1: General requirements.*
- ANSI/AAMI/ISO 11138-3:2017, *Sterilization of health care products - Biological indicators -Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes.*
- ANSI/AAMI/ISO 11138-7:2019, *Sterilization of health care products - Biological Indicators -Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results.*
- ANSI/AAMI/ISO 11138-8:2021, *Sterilization of health care products - Biological Indicators -Part 8: Method for validation of a reduced incubation time for a biological indicator.*

- **Classe de risco 1** (baixo risco individual e para a coletividade): Inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos saudáveis.

*Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA n° 751/2022.*



sac@cleanupbrazil.com.br



cleanupbrazil.com.br



+55 44 3017-1588