


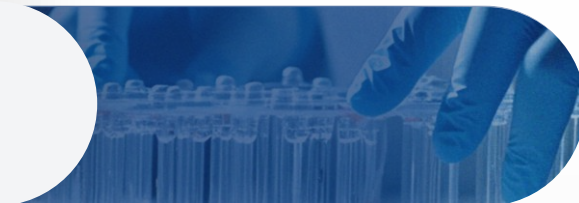

Descritivo Técnico

Clean Up Biotecnologia



→ Produto

Pacote Desafio Clean Test – Integrator

Referência: C1857, C1858

Fácil utilização

Um desafio para autoclave



→ Sobre o Produto

01

Indicador químico **conforme ISO 11140-1**



02

Incluso um integrador pastilha Tipo 5.



03

Testes de qualificação do esterilizador e monitorização da eficácia do esterilizador de rotina



→ Informações para Pedidos

ITEM #

EMBALAGEM

CÓDIGO DE BARRAS

C1857

1 Pacote



C1858

Caixa c/ 24 unidades



→ Descrição do Produto

O pacote desafio Clean Test integrador é um teste de uso único projetado para fornecer um desafio em autoclaves a 121°C e 134°C. É equivalente em desempenho a um indicador biológico aprovado no AAMI. Resultados na região de segurança refletem as condições do esterilizador que excedam os exigidos para matar esporos em indicadores biológicos. Resultados na região insatisfatória significam que as condições exigidas para a esterilidade não foram alcançadas. Proporciona uma leitura clara e simples para a liberação de carga imediata.

→ Instrução de uso

- 01. Posicione o pacote perto da porta da autoclave**, prateleira inferior de uma autoclave carregada normalmente, com a parte frontal do pacote voltado para cima como a escrita "ESTE LADO PARA CIMA", onde se encontra o indicador químico de passagem, que após a esterilização mudará a cor de rosa para marrom.
- 02. Executar** um ciclo de esterilização de acordo com as instruções do fabricante.
- 03. Remover o pacote da autoclave.** Cuidado: O pacote e conteúdos podem estar quentes. O operador deve usar luvas apropriadas e óculos de segurança. Abra o bloco e remova o indicador de esterilização Integrador e um cartão de registro.
- 04. Examine o indicador** de esterilização Integrador. Se a barra de cor escura não atingir a área de segurança o teste deve ser repetido com uma nova embalagem. O esterilizador e/ou o ciclo utilizado deve ser examinado.
- 05. Preencha as informações** necessárias na ficha de registro. Salvar como um registro permanente.
- 06.** Descarte o restante do pacote teste, ele **não pode ser reutilizado**.

→ Parâmetros Críticos do Processo

Pode ser utilizado em esterilizadores à vapor 121°C a 134°C. Verifique o tempo de morte do lote de indicadores utilizados no produto em nosso site.

Referência	Quantidade	Conteúdo do PCD - Integrator
C1857	1 Und.	Integrador Tipo 5 pastilha
C1858	Cx. 24 Und.	Integrador Tipo 5 pastilha

→ Conformidade

Integrador tipo 5 (pastilha) em conformidade com:

- ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014, *Sterilization of health care products - Chemical Indicators - Part 1: General requirements.*

Pacote Teste Desafio de acordo com o desafio recomendado pela AAMI.

→ Características Físicas

Produto fabricado por:
Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda.

Dimensões:
13,5 x 14 cm

Identificação: Lote e data de validade
estão impressos no pacote desafio

Validade: 24 meses após a
data de fabricação

●●● Não apresenta risco à saúde.

●●● Produto é *Lead Free* – Livre de Chumbo.

→ Armazenamento



Temperatura:
10 °C a 30 °C.



Umidade relativa:
30% a 80%



Mantenha em local seco,
sem condensação



Mantenha protegido de agentes
esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA n° 751/2022.



sac@cleanupbrazil.com.br



cleanupbrazil.com.br



+55 44 3017-1588