


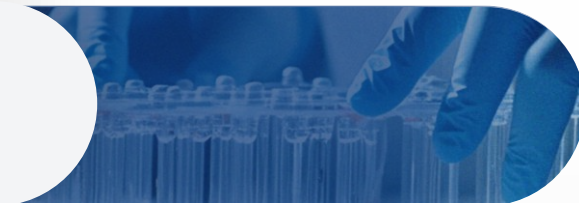

Descritivo Técnico

Clean Up Biotecnologia



→ Produto

Indicador Químico Circular Adesivo EO – Clean Test

Referência: C1771



Tipo 1



Fácil e simples utilização



→ Sobre o Produto

01

Indicador Químico **conforme**
ISO 11140-1



02

Transição de cor para melhor
visualização do processo



03

Monitora a exposição de processos
de esterilização de Óxido de Etileno
(EO/ETO)



04

Ótimo **custo benefício**



→ Informações para Pedidos

ITEM #

EMBALAGEM

CÓDIGO DE BARRAS

C1771

Rolo com 5000 unidades



7 898939 079883

→ Descrição do Produto

Este indicador químico circular adesivo EO Clean Test (ISO 11140-1: Tipo 1) é projetado para uso com unidades individuais (por exemplo: pacotes, recipientes) para indicar que a unidade foi exposta diretamente a um processo de esterilização por óxido de etileno (EO), distinguindo unidades processadas e não processadas.

→ Instrução de uso

01. **Use um indicador** em cada item/embalagem destinada à esterilização EO.

02. **Processe os pacotes/itens** conforme instruído no esterilizador.

03. **Após a exposição ao processo** de esterilização, o indicador circular passará de uma coloração azul para marrom acinzentado escuro ou amarelo ouro. A cor de transição pode variar dependendo da configuração da carga, duração e condições de exposição. Se a cor final não for alcançada, isso sugere que condições de exposição ideais podem não ter sido atendidas.

→ Verificação da condições de esterilização

- Tempo
- Temperatura
- Concentração de Gás
- Umidade

Não Processado



Processado



Obs: As cores mostradas são representações de tinta inicial e cores de sinal impressas, mas podem variar de uso real. A cor final obtida a partir da exposição a EO pode variar do exemplo acima devido a diferenças nos parâmetros de processamento (isto é, teor de carga, tempo de ciclo, temperatura, etc.). Para um Indicador de processo Tipo 1, qualquer alteração de cor produzida durante a exposição, diferente da cor inicial, é considerada aceitável.

→ Parâmetros Críticos do Processo

Concentração
de Gás EO

600 mg/l

Umidade
Relativa

60%

Temperatura

54 °C

Tempo

Mudança de Cor
após 20 minutos

→ Características Físicas

Produto é Lead Free- Livre de Chumbo

Conteúdo: Um rolo com 5000 unidades

Identificação: Lote e data de fabricação estão impressos na etiqueta da embalagem

Validade: 24 meses após a data de fabricação



Não apresenta risco à saúde

→ Armazenamento



Temperatura:
10 °C a 32 °C.



Umidade relativa:
20% a 80%



Mantenha em local seco,
sem condensação



Mantenha protegido de agentes
esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA n° 751/2022.



sac@cleanupbrazil.com.br



cleanupbrazil.com.br



+55 44 3017-1588