


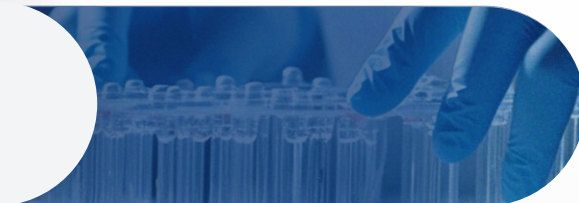

Descritivo Técnico

Clean Up Biotecnologia



→ Produto

Fita Adesiva para Óxido de Etileno (EO)


Referência: C1803



Identificação de itens processados



Fácil adesão aos materiais

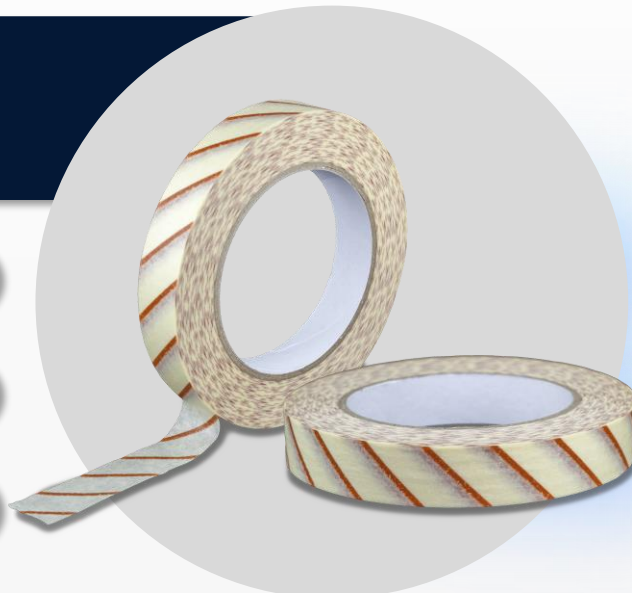

→ Sobre o Produto

01

Identifica itens processados
e não processados



02

Tinta com **mudança de cor**,
para identificação



03

Não contém **látex**



04

Processado em **Óxido de Etileno**



→ Informações para Pedidos

ITEM #

EMBALAGEM

C1803

Pacote com 1 unidade

→ Descrição do Produto

Fita Adesiva para Óxido de Etileno (EO) é à base de crepe, não contém chumbo ou outros metais pesados tóxicos e não contém látex. A fita é usada para fechar pacotes, invólucros de instrumentos e outros itens que requerem esterilização por EO. A fita EO é utilizada para **identificar** itens processados e não processados. A fita pode aderir a papel, plástico, vidro, metal e materiais não tecidos. A coloração inicial alaranjada será alterada para marrom/verde após o processamento em óxido de etileno 600 mg/L em 54°C e 60% RH durante 20 minutos.


→ Instrução de uso

01. Use uma **seção mínima de 8 cm** de fita para fechar pacotes/itens destinados à esterilização por Óxido de Etileno (EO).
02. **Processe** conforme instruído na validação ou manual do esterilizador.
03. Após a exposição ao Óxido de Etileno (EO), as listras do indicador farão a **transição de cor** alaranjada para **marrom/verde**.
04. A cor de transição **pode variar** dependendo da configuração da carga, comprimento e condições de exposição. A reação química que causa a transição de cor é uma reação específica do EO e é irreversível quando armazenados de acordo com as instruções de condições de armazenamento.

Não-exposto



Exposto

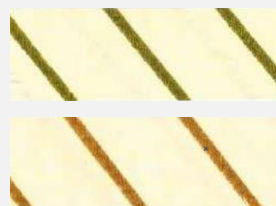

Obs: As cores mostradas são representações das cores iniciais e de sinal da tinta impressa, mas podem variar em relação ao uso real. Para um indicador de processo Tipo 1, uma mudança de cor marrom/verde produzida durante a exposição ao EO que é diferente da cor laranja inicial é considerada aceitável.

→ Características Físicas

Produto é Lead Free- Livre de Chumbo

Medidas: 19mm x 50m

Identificação: Lote e data de fabricação estão impressos na embalagem do produto

Validade: 24 meses após a data de fabricação

→ Conformidade

- ● ● ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products – Chemical indicators- Part 1: General requirements* para indicadores químicos Tipo 1.

→ Armazenamento



Temperatura:
15 °C a 30 °C.



Umidade relativa:
20% a 80%



Mantenha em local seco,
sem condensação



Mantenha protegido de agentes
esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA n° 751/2022.



sac@cleanupbrazil.com.br



cleanupbrazil.com.br



+55 44 3017-1588